

INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

1. Instrucciones de montaje y reemplazo

El punto 2 de esta instrucción “Instrucciones de montaje y reemplazo - Q50R” contiene las fotos y las instrucciones para realizar el reemplazo del perno y el casquillo, y su correcto montaje

Cada instrucción visual separada está precedida por:

- Notas de preparación
- Instrucciones
- Herramientas que se necesitan
- Aviso (si corresponde): notas adicionales que cubren la información que necesita al ejecutar la tarea específica.

2. Instrucciones de montaje y reemplazo - Q50R

Preparación


Herramientas que se necesitan

OJO! Apague la silla de ruedas a través del botón del controlador P&G

Instrucciones

OJO! ¡Se requiere un área de trabajo adecuada!

- Siga las instrucciones ilustradas para quitar el perno del marco y volver a montar la silla de ruedas.
- Vuelva a trabajar el lado derecho de la misma manera.

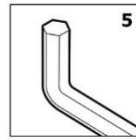

Loctite cola aprobada para Q50R:
242,262,263,270,
271,277 & 290



Fig. 2.1

1. Retire el perno (A) con una llave hexagonal de 5 mm.

Fig. 2.2

2. Retire el casquillo metálico (B) del brazo de la rueda.

Fig. 2.3

3. Retire la arandela ©.

Fig. 2.4

4. Instale el casquillo de acetal negro (D) en el orificio del brazo de la rueda.

Fig. 2.5

5. Coloque la arandela de acetal negra (E) entre el marco y el brazo de la rueda.

Fig. 2.6

6. Aplique uniformemente el adhesivo anaeróbico Loctite 263/277 a la rosca parte del perno con tope (F). Apriete el perno con tope (F) a 20 Nm con una llave dinamo-métrica. Coloque la silla de ruedas durante 24 horas hasta que el pegamento esté completamente curado antes de usar.

